

Cleanisept Wipes Forte



Oblast primene:

Prema Direktivi za Medicinska Sredstva: dezinfekcija i ?iš?enje medicinskih sredstava kao što su glave ultrazvu?nih sondi za izvo?enje transvaginalnih, transrektalnih i abdominalnih pregleda kao i TEE-pregleda.

Upotreba: Obrisati površinu i instrumente dok ne budu potpuno nakvašeni. Kada pro?e vreme

izlaganja, dobro isprati sa vodom glavu ultrazvu?ne sonde.

Spektar aktivnosti: Baktericidno dejstvo uklju?uju?i MRSA, fungicidno dejstvo prema DGHM/VAH (dezinfekcija površina mehani?kom radnjom) Virucidno dejstvo prema RKI/DVV uklju?uju?i Polio-, Adeno-, Papova/Polyoma-, Vaccinia virus kao i HBV/ HIV/HCV/In?unca virus. Sporocidalno dejstvo (C.di?cile) prema EN 13704.

Vreme izlaganja: 2 min.* * navedeno u koloni za 5min VAH liste.

Sastav: 100g te?nosti sadrži: 0.4 g Kvaternarnog amonijumovog jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil-hlorid 0.2 g didecildimetilamonijumhlorid

Dodatne informacije: Ako do?e u kontakt sa o?ima: oprezno isprati sa vodom tokom nekoliko minuta. Ako su prisutna kontaktna so?iva, skinuti ih ako je mogu?e. Nastaviti sa ispiranjem.

Odbaciti sadržaj/kontejner u skladu sa lokalnom i nacionalnom regulativom. ?uvati van domašaja dece.