

Perfektan Extra

Oblast primene: Dezinfekcija i ?iš?enje svih hirurških instrumenata uklju?uju?i ?eksibilne endoskope, MIC instrumente i termolabilne materijale. Pogodno za upotrebu u ultrazvu?nom kupatilu.

Upotreba: Uroniti instrumente u radni rastvor odmah nakon upotrebe. Svaka površina i šupljina mora biti kompletno nakvašena radnim rastvorom. Nakon vremena izlaganja, dobro isprati instrumente ?istom vodom. Preporu?ujemo krajnje ispiranje destilovanom vodom, a zatim sušenje.

Koncentracije i spektar aktivnosti: Baktericidno dejstvo uklju?uju?i MRSA, fungicidno dejstvo prema EN 13727/ EN 1276/ EN 1650: 0,25%-5 min; inaktivira viruse sa ovojnicom uklju?uju?i HBV,HIV,HCV, BVDV,Vaccinia virus: 0,25%-5 min.

Sastav: 100g rastvora sadrži: Didecilmetiloksetilammonijumpropionat 5.63 g

OPREZ Izaziva ozbiljne opekotine na koži i ošte?uje o?i. Dugotrajni toksi?ni efekti na vodeni svet. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu ode?u/ zaštitu za o?i/ zaštitu za lice. Ako se proguta: isprati usta. NE izazivati povra?anje. Ako do?e u kontakt sa kožom ili kosom: odmah skinuti svu kontaminiranu ode?u. Isprati kožu vodom. Ako se udahne: iza?i na svež vazduh i odmarati u povoljnom položaju za disanje. Ako do?e u kontakt sa o?ima: oprezno isprati sa vodom tokom nekoliko minuta. Ako su prisutna kontaktna so?iva, skinuti ih ako je mogu?e. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah pozvati centar za trovanje ili lekara. Odbaciti sadržaj/kontejner u skladu sa lokalnom i nacionalnom regulativom.

